



LONTAX GOLA

Lontax Gola Spray Orale
con Carragelose®

Istruzioni per l'uso

LONTAX GOLA SPRAY ORALE con Carragelose®

Che cos'è LONTAX GOLA SPRAY ORALE con Carragelose®?

LONTAX GOLA SPRAY ORALE forma una barriera protettiva nella gola contro i virus del raffreddore, un film umido che aiuta le difese naturali dell'organismo.

LONTAX GOLA SPRAY ORALE può essere usato come supporto per la profilassi e il trattamento delle infezioni virali del tratto respiratorio superiore.

LONTAX GOLA SPRAY ORALE può anche essere usato a scopo preventivo per umidificare in modo prolungato la mucosa del cavo orale e faringea.

LONTAX GOLA SPRAY ORALE può essere usato negli adulti e nei bambini a partire da 1 anno di età.

LONTAX GOLA SPRAY ORALE **non** contiene **conservanti**. Un filtro sterile garantisce la sterilità della soluzione anche dopo l'uso ripetuto.

Che cosa contiene LONTAX GOLA SPRAY ORALE con Carragelose®?

LONTAX GOLA SPRAY ORALE è una soluzione viscosa, incolore, limpida al gusto di ciliegia.

1 ml di soluzione contiene 1,2 mg di iota-carragenina (Carragelose®), sodio cloruro, xilitolo, aroma di ciliegia, soluzione tampone e acqua depurata.

Quali sono le proprietà di LONTAX GOLA SPRAY ORALE con Carragelose®?

Il raffreddore comune è causato principalmente da virus. Il naso e la bocca sono le vie di infezione più frequenti per i virus. Quando i virus penetrano nel tratto respiratorio, possono colonizzare le mucose e infettarne le cellule, moltiplicandosi e diffondendosi. Questo causa i sintomi tipici di una malattia simil-influenzale, come mal di gola, naso chiuso o naso che cola e/o mal di testa, tosse, ecc.

L'umidità fisiologica delle mucose aiuta le difese naturali dell'organismo contro virus e agenti esterni ambientali. La permanenza frequente in luoghi con bassa umidità relativa (come locali riscaldati o climatizzati, auto, treni o aerei) può seccare e irritare le mucose della bocca e della gola. Anche uno sforzo fisico intenso della gola, come fumare, parlare a lungo o cantare, può seccare la mucosa della bocca e della gola. Di frequente questo causa tosse, raucedine o mal di gola.

LONTAX GOLA SPRAY ORALE contiene Carragelose®, una sostanza di origine marina, ottenuta dalle alghe rosse. Carragelose® ha un duplice effetto positivo.

- LONTAX GOLA SPRAY ORALE forma una barriera protettiva contro i virus che causano il raffreddore comune e le sindromi simil-influenzali. Il raffreddore comune e le malattie simil-influenzali sono causati da una notevole varietà di virus, tra cui Rhinovirus e Coronavirus. Carragelose® ingloba aspecificamente tali virus e ne impedisce l'adesione alle mucose, riducendo così la moltiplicazione e la diffusione dei virus che infettano le vie respiratorie.

Analogamente ai virus che causano malattie simil-influenzali, l'attività aspecifica di Carragelose® di intrappolamento dei virus è stata evidenziata anche in test in vitro per SARS-CoV-2. Anche se LONTAX GOLA SPRAY ORALE non è in grado di evitare del tutto un'infezione da SARS-CoV-2, può comunque ridurre decisamente il rischio di infezione e diffusione del virus.

- LONTAX GOLA SPRAY ORALE stabilizza il film umido fisiologico della mucosa faringea garantendo così un'umidificazione prolungata. Tale film umido fisiologico funziona come barriera fisica contro gli agenti esterni ambientali e aiuta le difese naturali dell'organismo.

Indicazioni terapeutiche - A che cosa serve LONTAX GOLA SPRAY ORALE con Carragelose®?

- Per la profilassi e il trattamento di supporto delle infezioni virali del tratto respiratorio superiore.
- Per umidificare la mucosa orale e faringea, ad esempio in caso di tosse, raucedine o di permanenza in ambienti in cui si respira aria secca.
- Per la prevenzione e il trattamento di supporto per tutti i disturbi derivanti da una mucosa orale e faringea asciutta o irritata, causati ad esempio dal fumo, dal parlare a lungo o dal cantare.

Posologia e modo di somministrazione

Come e con quale frequenza si usa LONTAX GOLA SPRAY ORALE con Carragelose®?

In base alle necessità individuali, applicare 2 o più spruzzi nella gola almeno 3 volte al giorno nella gola.

LONTAX GOLA SPRAY ORALE può essere usato regolarmente se necessario, in quanto non vi è alcun rischio di sovradosaggio.

Alla prima applicazione, se necessario, premere l'erogatore alcune volte fino a ottenere una nebulizzazione uniforme. Mantenere il flacone in posizione verticale durante l'applicazione in modo tale che il tubicino di aspirazione raggiunga il liquido. Per evitare lesioni, introdurre l'estremità dell'erogatore in bocca con cautela e non troppo in profondità.

Quando non deve essere utilizzato LONTAX GOLA SPRAY ORALE con Carragelose®?

In caso di ipersensibilità nota a uno dei componenti.

Possibili effetti collaterali/interazioni con altri prodotti

Ad oggi, non sono noti effetti collaterali, eccetto rarissimi casi di ipersensibilità.

Non sono stati condotti studi sulle interazioni con altri prodotti.

Precauzioni particolari per l'uso

LONTAX GOLA SPRAY ORALE può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

LONTAX GOLA SPRAY ORALE agisce a livello locale. Carragelose® non è assorbito dalle cellule della mucosa faringea.

Qualsiasi incidente grave che si verifichi in seguito all'uso di LONTAX GOLA SPRAY ORALE deve essere comunicato al Fabbrikante e all'autorità competente del suo Paese.

LONTAX GOLA SPRAY ORALE è un dispositivo medico. Se i sintomi persistono, consultare un medico. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Altre informazioni

LONTAX GOLA SPRAY ORALE può essere usato per un periodo di tempo prolungato. Non vi è alcun rischio di assuefazione o sovradosaggio.

LONTAX GOLA SPRAY ORALE non contiene antidolorifici, conservanti, componenti di origine animale o gas serra.

LONTAX GOLA SPRAY ORALE è privo di lattosio e glutine e può essere utilizzato dai diabetici.

Confezione

Flacone da 20 ml con erogatore a spruzzo; 1 spruzzo = 0,14 ml di soluzione (in totale 142 spruzzi).

Periodo di validità

36 mesi dalla data di produzione.

Grazie allo speciale sistema filtrante, la soluzione rimane sterile anche dopo un uso ripetuto. LONTAX GOLA SPRAY ORALE può essere usato per 24 mesi dopo il primo utilizzo.

Istruzioni per la conservazione

Conservare tra 5 °C e 30 °C.

Proteggere dalla luce.

**Fabbrikante**

Hälsa Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5,
23562 Lubeca, Germania

Distributore

Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3/A
35031 Abano Terme (PD)
Italia

STERILE A**CE 0482**

Rev.XX data /data

Testo revisionato: Agosto 2020

Dispositivo medico